

Socialförvaltningen

Godkänd: Annika Eriksson, Karin Holmin	Löpnr.: 1	Dokumentklass Rutin	Version: 1.0	Sida 1(3)
Författare: Enhetschefer Lotta Jakobsson och Mats Edström, At Ingrid Sehlin, hygiensköterska Matilda Foborg LVN			Datum: 2017-08-18	

Praktisk hantering vid rengöring av hjälpmedel från användare med känd smitta inför återlämnande till Hjälpmedel Västernorrland

Rutin

Förorenade textilier som inte tål att tvättas i minst 60°C eller hjälpmedel som är trasigt och därmed inte går att rengöra och/eller desinfektera kasseras. När hjälpmedlet kasseras skall kontakt med kommunens hjälpmedelscontroller tas för vidare instruktioner.

Hjälpmedlet får inte lämna patientens bostad innan det omhändertagits enligt följande:

- Tag på engångsskoskydd, desinfektera händerna, tag på engångsförkläde i plast.
- Lagg underlägg under hjälpmedlet för att skydda golvet från vatten och rengöringsmedel.
- Desinfektera händerna och tag på skyddshandskar.
- Gör rent hjälpmedlet med rengöringsmedel och vatten om det är synligt smutsigt.
 - Använd en diskborste eller tvättsvamp vid rengöringen.
 - Tänk på om hjälpmedlet har elektronik, exempelvis lyftens batteribox, torka av dessa detaljer med en väl urkramad torkduk.
 - Torka torrt med t ex tvättlappar.

Socialförvaltningen

Godkänd: Annika Eriksson, Karin Holmin	Löpnr.: 1	Dokumentklass Rutin	Version: 1.0	Sida 2(3)
Författare: Enhetschefer Lotta Jakobsson och Mats Edström, At Ingrid Sehlin, hygiensköterska Matilda Foborg LVN			Datum: 2017-08-18	

- Desinfektera sedan hjälpmedlet med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid.
 - Blöt ner tvättlappar rikligt med desinfektionsmed
 - Tänk på om hjälpmedlet har elektronik, exempelvis lyftens batteribox, torka av dessa detaljer med en väl urkramad torkduk.
 - Låt hjälpmedlet torka torrt.
- Textilier läggs i vattenupplöslig tvättsäck för transport till tvättmaskin.
 - Vid tvätt skall textilierna ligga kvar i tvättsäcken.
 - Tvättas i minst 60 °C.
- Den använda diskborsten eller tvättsvampen, torkpapperet, plastunderlägget etc. ska kasseras. Lägg i en plast/avfallspåse.
- Tag av förkläde, handskar och lägg i avfallspåsen. Desinfektera händerna.
- Ta på nya plasthandskar.
 - Desinfektera rengörings- och desinfektionsflaskan och lägg tillbaka den i påsen "Rengöringskit".
 - Tag av handskarna, lägg dessa i plastpåsen som försluts och hanteras som vanligt avfall.
- Tvätta händerna med tvål och vatten, torkas torra med torkpapper. Desinfektera händerna.
- Hjälpmedlet kan nu transporteras från hemmet.

Socialförvaltningen

Godkänd: Annika Eriksson, Karin Holmin	Löpnr.: 1	Dokumentklass Rutin	Version: 1.0	Sida 3(3)
Författare: Enhetschefer Lotta Jakobsson och Mats Edström, At Ingrid Sehlin, hygiensköterska Matilda Foborg LVN			Datum: 2017-08-18	

Rengöringskittet består av

Antal	Benämning
1 st	Plastpåse – förvara kittet i
4 st/2 par	Engångs Skoskydd
2 st	Förkläde – långt
6 st /3 par	Handskar (small/medium/large)
3 st	Underlägg
1 st	Desinfektion för händer, liten flaska
1 st	Allmänrengöring på flaska
1 st	Tvättsvamp
1 st	Diskborste
10 st	Tvättlapp
1 st	Tvättsäck – vattenlöslig
2 st	Plastpåse = soppåse